

Kurzanleitung Clungene-Selbsttest

Schritt 1: Testkassette öffnen und mit **Vor- und Nachnamen** beschriften.



Schritt 2: Teströhrchen in die Wäscheklammer stellen, Verschluss der Pufferlösung abdrehen und Lösung ins Röhrchen geben.




Schritt 3: Tupferverpackung **halb** öffnen und Tupfer am unteren Ende aus der Packung nehmen.



Schritt 4: Maske unter die Nase ziehen.



- Kopf leicht nach hinten neigen.
- Tupfer ca. 2 cm tief in die Nase einführen.
- 5x mit leichtem Druck gegen die Nasenwand kreisen.
- Im zweiten Nasenloch **wiederholen**.

Maske wieder aufsetzen.

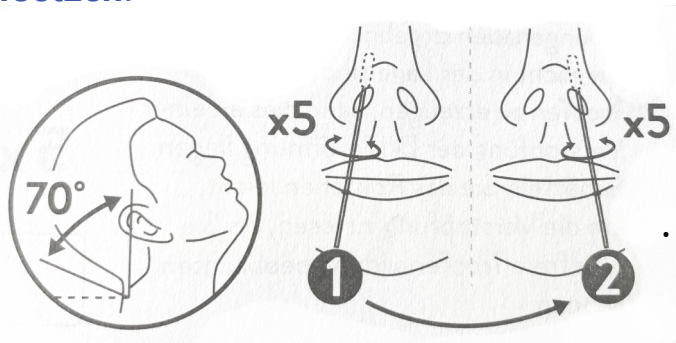

Schritt 5: Tupfer ins Röhrchen stecken und schwenken, drehen, gegen Boden und Wand des Röhrchens drücken.

▲ **Tupfer 1 min in Röhrchen ruhen lassen!**

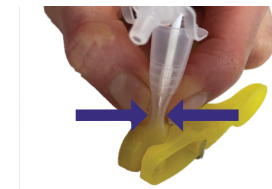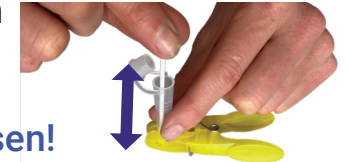

Schritt 6: Tupferkopf gut mit dem Röhrchen ausdrücken. Tupfer Kopf voraus in die Verpackung zurück stecken.

Schritt 7: Röhrchen mit Tropfkappe gut verschließen.




Schritt 8: Röhrchen **senkrecht** über die **ovale** Probenvertiefung 'S' halten und **3 Tropfen** in die Vertiefung geben.

Schritt 9: Testkassette nicht mehr bewegen!

Nach ca. 15 Minuten Testergebnis ablesen.

Strich nur bei C -> **Test negativ**

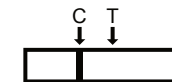

Strich bei C und T -> **Test positiv**

