


# COVID-19 Antigen-Selbsttest (nasal)

**Schritt 1:** Testkassette öffnen und mit **Vornamen** beschriften.

**Schritt 2:** **Blauen Deckel** vom Röhrchen **abschrauben** und Röhrchen offen ins Glas stellen.

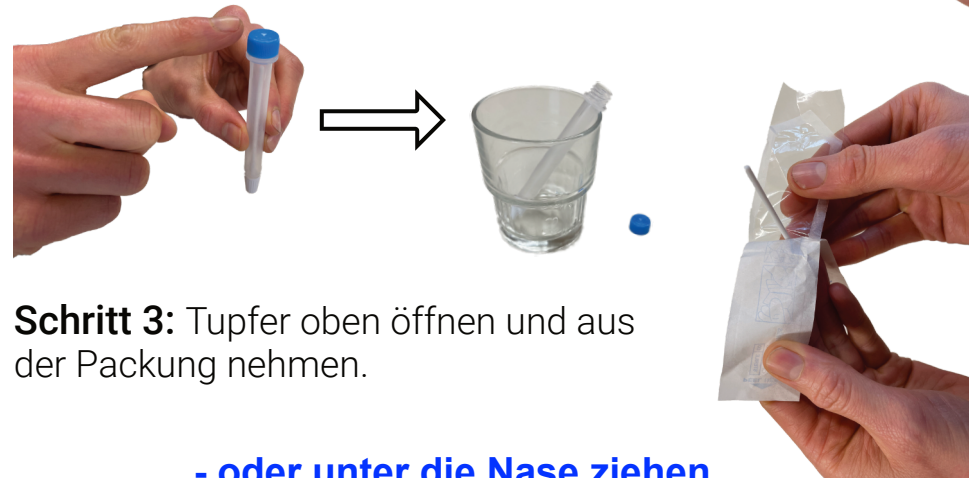


**Schritt 3:** Tupfer oben öffnen und aus der Packung nehmen.


**- oder unter die Nase ziehen.**

**Schritt 4:** **Maske von einem Ohr abnehmen.** Tupfer ca. 2cm in die Nase einführen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist. Mit **leichtem Druck 5x** gegen die Nasenwand (Mitte) drehen, im zweiten Nasenloch wiederholen.

**Maske wieder anziehen.**

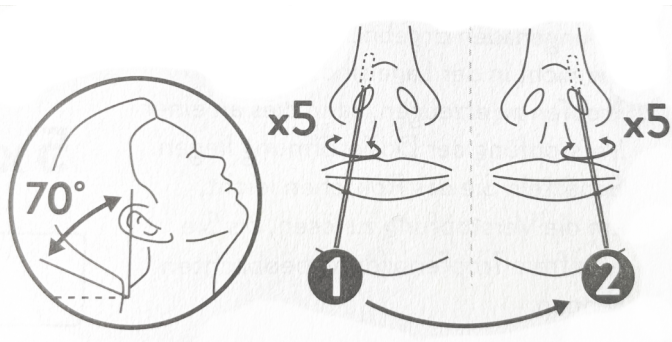

**Schritt 5:** Tupfer ins Röhrchen stecken, in der Flüssigkeit **schwenken** und **ca. 5x** gegen den Boden / die Wand drücken.

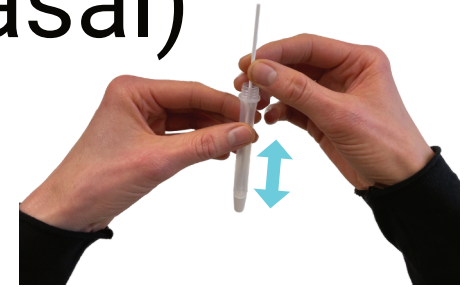

**Schritt 6:** Tupfer etwas hochziehen und **ausdrücken**. Tupfer an der Bruchstelle **abbrechen** und blauen Deckel auf das Röhrchen schrauben.




**Schritt 7:** **Weißes Deckel** unten am Röhrchen **öffnen**, Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und **5 Tropfen** in die Vertiefung "S" auf der Testkassette tröpfeln. Weißes Deckel wieder festschrauben und Röhrchen in das Glas stellen.



**Schritt 8: Testkassette nicht mehr bewegen!**

Nach ca. 15 Minuten Testergebnis ablesen.

Strich nur bei C -> **Test negativ**

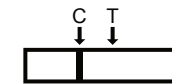

Strich bei C und T -> **Test positiv**

