


Kurzanleitung Hotgen-Selbsttest

Schritt 1: Testkassette öffnen und mit **Vor- und Nachnamen** beschriften.



Schritt 2: Teströhrchen in die Wäscheklammer stellen, **großen lila Deckel** abschrauben.

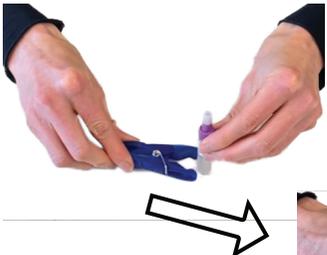


Schritt 3: Tupferverpackung **halb** öffnen und Tupfer am unteren Ende aus der Packung nehmen.



Schritt 4: Maske unter die Nase ziehen.

- Kopf leicht nach hinten neigen.
- Tupfer ca. 2 cm tief in die Nase einführen.
- 5x mit leichtem Druck gegen die Nasenwand kreisen.
- Im zweiten Nasenloch **wiederholen**.

Maske wieder aufsetzen.

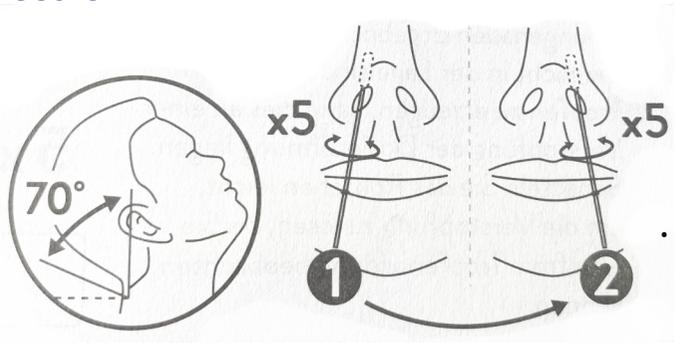

Schritt 5: Tupfer ins Röhrchen stecken und ca. 15 sec **umrühren und drehen**.



Schritt 6: Tupferkopf mit dem Röhrchen **3x ausdrücken**. Tupfer bis zur Sollbruchstelle hochziehen und abbrechen.



Schritt 7: Lila Deckel wieder aufschrauben und die **kleine transparente Kappe** abdrehen.




Schritt 8: Röhrchen umdrehen, kurz warten und vorsichtig **4 Tropfen** in die **runde Probenvertiefung 'S'** füllen.

Schritt 9: Testkassette nicht mehr bewegen!

Nach ca. 15 Minuten Testergebnis ablesen.

Strich nur bei C -> **Test negativ**

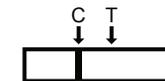

Strich bei C und T -> **Test positiv**

