

COVID-19 Antigen-Selbsttest (nasal)

Schritt 1: Testkassette öffnen und mit **Vor- und Nachnamen** beschriften.



Schritt 2: Teströhrchen in die Wäscheklammer stellen, Folie abziehen.




Schritt 3: Tupferverpackung **halb** öffnen und Tupfer am unteren Ende aus der Packung nehmen.




Schritt 4: Maske unter die Nase ziehen.

- Kopf leicht nach hinten neigen.
- Tupfer ca. 2 cm tief in die Nase einführen.
- 5x mit leichtem Druck gegen die Nasenwand kreisen.
- Im zweiten Nasenloch **wiederholen**.

Maske wieder aufsetzen.

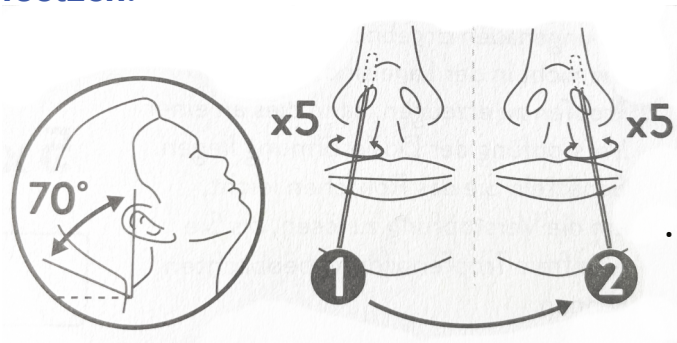


Schritt 5: Tupfer ins Röhrchen stecken und ca. 15 sec **umrühren und drehen**.

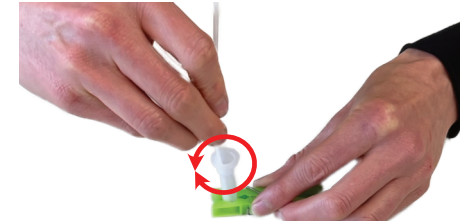

Schritt 6: Tupferkopf mit dem Röhrchen **ausdrücken**. Tupfer mit dem Kopf voraus in die Verpackung schieben.

Schritt 7: Verschluss mit der Spitze nach oben auf das Röhrchen stecken.

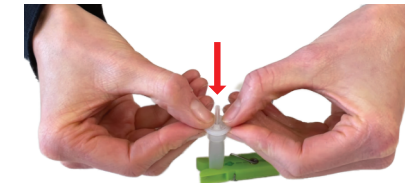


Schritt 8: Röhrchen umdrehen, kurz warten und vorsichtig **4 Tropfen** in die **runde Probenvertiefung** füllen.

Schritt 9: Testkassette nicht mehr bewegen!

Nach ca. 15 Minuten Testergebnis ablesen.

Strich nur bei C -> **Test negativ**

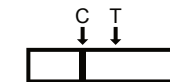

Strich bei C und T -> **Test positiv**

